

販売元：ロート製薬株式会社
製造販売元：ロート製薬株式会社

ドゥーテスト LH II

排卵日予測検査薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ドゥーテスト[®]LH II

排卵日予測検査薬



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ドゥーテスト LH II
2	成分・分量	(テストスティック 1 本中) 金コロイド標識抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体(マウス) 抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体(マウス) 抗マウス IgG・ポリクローナル抗体(ウサギ)
3	使用目的	尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出(排卵日予測の補助)
4	使用方法	【検査のタイミング】 ご自分の生理(月経)周期から換算して、次の生理(月経)開始予定日の 17 日前から検査を開始してください。 【検査の仕方】 検査開始日から、1 日 1 回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。 (過去に検査して LH サージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性か陰性かの判定に迷う場合などには、1 日 2 回検査を行うことで、より LH サージをとらえやすくなります。) ・検査の手順及び判定の仕方 テストスティックに尿をかけて、基準ラインの線の濃さを比較してください。 検査方法の詳細は商品に同梱されている「添付文書」並びに「ご使用の手引き」に記載してありますので、必ずご確認の上、ご使用ください。
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は使用しないでください。 ・避妊目的で使う人 本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。 2. 次の人は、使用前に医師に相談してください。 ・不妊治療を受けている人。 ・通常の性交を継続的に行っても 1 年以上妊娠しない人。 ・生理(月経)周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人。 3. 上記 1. 2. に該当しない場合、使用可能になります。 (1. 2. に該当した場合は、医師にご相談の上ご使用ください。) 以下の点に注意した上で、ご使用ください。 ・適正使用をする為に商品に同梱されているチェックシートをご確認の上、ご使用ください。 ・検査期間中、陰性が続き LH サージが確認できない場合は、早期に医師又は薬剤師にご相談ください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第 1 類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。