

販売元：オムロンヘルスケア(株)  
専任製造販売業者：アリアメディカル(株)

クリアブルー排卵日予測テスト

排卵日予測検査薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
**説 明 文 書**

**Clearblue** クリアブルー



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	クリアブルー排卵日予測テスト
2	成分・分量	テストスティック 1本中 抗 $\beta$ -LH マウスモノクローナル抗体結合青色ラテックス粒子 抗 $\alpha$ -LH マウスモノクローナル抗体
3	使用目的	尿中の黄体形成ホルモン（LH）の検出（排卵日予測の補助）
4	使用方法	<b>■検査のタイミング</b> ご自分の生理（月経）周期から換算して、次の生理（月経）開始予定日の17日前から検査を開始してください。 検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。（過去に検査してLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性か陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。） <b>■検査のしかたと判定</b> テストスティックに尿をかけて、判定窓のテストライン（矢印に近いライン）とコントロールライン（矢印から遠いライン）の青色の有無及び濃淡を比較してください。 検査方法の詳細は商品に同梱されている「添付文書」並びに「説明文書」に記載してありますので、必ずご確認の上、ご使用ください。
5	保健衛生上の危害を防止するために	<b>■してはいけないこと</b> 本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。（本品は、排卵日予測の補助を目的とした検査薬であり、避妊目的には使用できません。） <b>■相談すること</b> ① 次の人は、使用前に医師に相談すること。 ・不妊治療を受けている人 ・通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人 ・生理（月経）周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人 ② 検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師、薬剤師に相談すること。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。